

RACC@WAY®

e-motorcycles

(CZ) UŽIVATELSKÝ NÁVOD

 FOLD



POZORNĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU,
NEŽ ZAČNETE MOTOCYKL POUŽÍVAT.

RACC@WAY®

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt řady elektrických skútrů Raceway. Elektro kompenzační vozíky jsou určeny speciálně pro seniory a osoby s omezenou schopností pohybu. Slouží především starším lidem a osobám s problémy s mobilitou. Kromě toho je lze použít jako vozidla pro dojíždění pro manažery velkých společností, bezpečnostní hlídky a jako dopravní nebo nákupní nástroje na golfových hřištích, velkých zábavních parcích, zábavních parcích, zoologických zahradách, muzeích, prohlídkových komunitách a velkých supermarketech. Před použitím vozíku si prosím pečlivě a důkladně přečtěte tento návod k použití, protože je zásadní pro váš bezpečný provoz. Také, pokud tento skútr převedete na jinou osobu, ujistěte se, že manuál byl předán také novému majiteli.

I . Bezpečnostní provoz

Před prvním použitím elektrického skútru si pozorně přečtěte tuto část a pochopte všechna opatření, abyste zajistili bezpečné, pohodlné a volné řízení skútru. To je pro vás velmi důležité. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svého prodejce

• **Před provozem:**

1 , Seznamte se s místními dopravními předpisy

Elektromobilní skútr je klasifikován jako nemotorové vozidlo. Podle dopravních zákonů není potřeba řidičský průkaz, ale musíte dodržovat dopravní předpisy stejně jako chodci. Použijte prosím přechody pro chodce nebo nemotorizované pruhy. Při jízdě po krajnici nepřecházejte silnici náhle šikmo.

2 , Cvičení provozu

Před prvním použitím elektrického skútru se seznámte s jeho různými funkcemi. Cvičte pohyb vpřed, zrychlování, zpomalování, zastavování, couvání, stoupání, klesání a otáčení na místě s malým počtem lidí, s dobrými půdními podmínkami a bezpečným prostředím. Na cestu ji vezměte až poté, co tyto operace zvládnete. Před prvním použitím zkontrolujte stav skútru, ujistěte se, že brzdy reagují, všechny funkce jsou normální a baterie je dostatečně nabitá

• **Upozornění :**

Nikdy nevystavujte elektrický systém vašeho elektrického skútru vlhkému prostředí po delší dobu (např. déšť, sníh). Tělo skútru neomývejte přímo vodou. Pokud navlhne, před použitím se ujistěte, že je suchý a bez závad.

Neprovozujte koloběžku za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je déšť, sníh, mlha, silný vítr nebo extrémní teploty. Vyhněte se jízdě v pouštích, na plážích, v blátivých oblastech nebo na mokřím, zledovatělém nebo kluzkém povrchu, abyste předešli problémům s výkonem a nehodám.

Nejezděte na skútru pod vlivem alkoholu, při nadměrné únavě nebo ve stavu zmatenosti. Pokud má obsluha duševní onemocnění nebo jakýkoli stav, který by mohl způsobit náhlou ztrátu kontroly, neřidte skútr.

• **Během provozu:**

1. Tento elektrický skútr je omezen na jednu osobu. Nevozte cestující. Skútr by se neměl používat k přepravě nebo tažení zboží.
2. Při řízení skútru nestůjte. Obsluha musí sedět na sedadle a pevně držet řídítka. Vyhněte se hadovité jízdě, ostrým zatáčkám při vysokých rychlostech a posouvání těla, abyste zabránili převrácení.
3. Věnujte zvýšenou pozornost a snižte rychlost při jízdě na nerovných nebo složitých silnicích a v přeplněných oblastech. Při řízení nepoužívejte mobilní telefony ani jiná bezdrátová komunikační zařízení. Před použitím takových zařízení zastavte skútr na bezpečném místě a vypněte napájení.

4. Při couvání dávejte pozor na okolí a pohybujte se pomalu. Při opouštění místností nebo výtahů se pohybujte pomalu a pro jízdu nahoru nebo dolů nepoužívejte eskalátory.
5. Při stoupání nebo sjíždění svahů buďte velmi pozorní, pevně uchopte řídítka a pokračujte rovně nízkou rychlostí. Nestoupejte násilím do svahů, které přesahují limit skútru. Vyhněte se přecházení překážek nebo schodů vyšších než 8 cm, protože to může bránit pohybu skútru.
6. Při projíždění křižovatkou dodržujte prosím pravidla silničního provozu, nejezděte na červenou, nejprve zastavte a sledujte, a když se rozsvítí zelená, jed'te pomalu.
7. Úmyslně často neotevírejte ani nezavírejte elektrický zámek a často elektrický skútr nespouštějte ani nezastavujte.
8. Nepůjčujte vozík osobám, které nikdy nepoužívaly nebo nejsou obeznámeny s používáním a ovládáním vozíku a nedovolte dětem hrát si s vypínačem a ovládací rukojetí.

• **Po jízdě:**

1. Po zaparkování prosím vypněte elektrický zámek, když tam nikdo není, a nenechávejte klíč na elektrickém zámku.

2. Pokud nebudete vozík používat déle než 1 týden, odpojte prosím baterii.

II . Instrukce

(1) Pokyny k funkci displeje :

Podívejte se prosím na následující obrázek:



1. Elektrický zámek

Ovládá zapínání a vypínání vozíku .

2. Ovladač jízdy

Ovládejte jízdu vozíku vpřed, vzad, zrychlení, zpomalení a parkování. Po zapnutí elektrického zámku zatáhněte pravým prstem za páku na pravé straně přístroje dozadu a vozík se pohne dopředu. Čím větší úhel, tím vyšší rychlost. Pomalu uvolněte páku a vozík zpomalí. Když je zcela

uvolněn a páka je resetována, vozík se zastaví a bude ve stavu brzdění. Podobně levým prstem zatáhněte za páku na levé straně nástroje dozadu a vozík se pohne dozadu. Čím větší úhel, tím vyšší rychlost. Pomalu uvolněte páku a vozík zpomalí. Když je zcela uvolněn a páka je resetována, vozík se zastaví a bude ve stavu brzdění.

3. Kolečko pro nastavení rychlosti

Upravte maximální rychlost vozíku. Otáčením po směru hodinových ručiček rychlost postupně zvyšujte a otáčením proti směru hodinových ručiček rychlost postupně snižujete.

4. Tlačítko světlometů

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete světlomety a dalším stisknutím světlomety vypnete.


5. Klakson


Stisknutím tohoto tlačítka zazní klakson.

6. Zobrazení displaye

Zapněte hlavní vypínač, na obrazovce se zobrazí výkon baterie, rychlost jízdy, celkový počet ujetých kilometrů, plný pruh znamená, že výkon je silný, polovina pruhu znamená, že výkon je klesá a baterii je třeba nabít včas.

Další funkce a úvod:

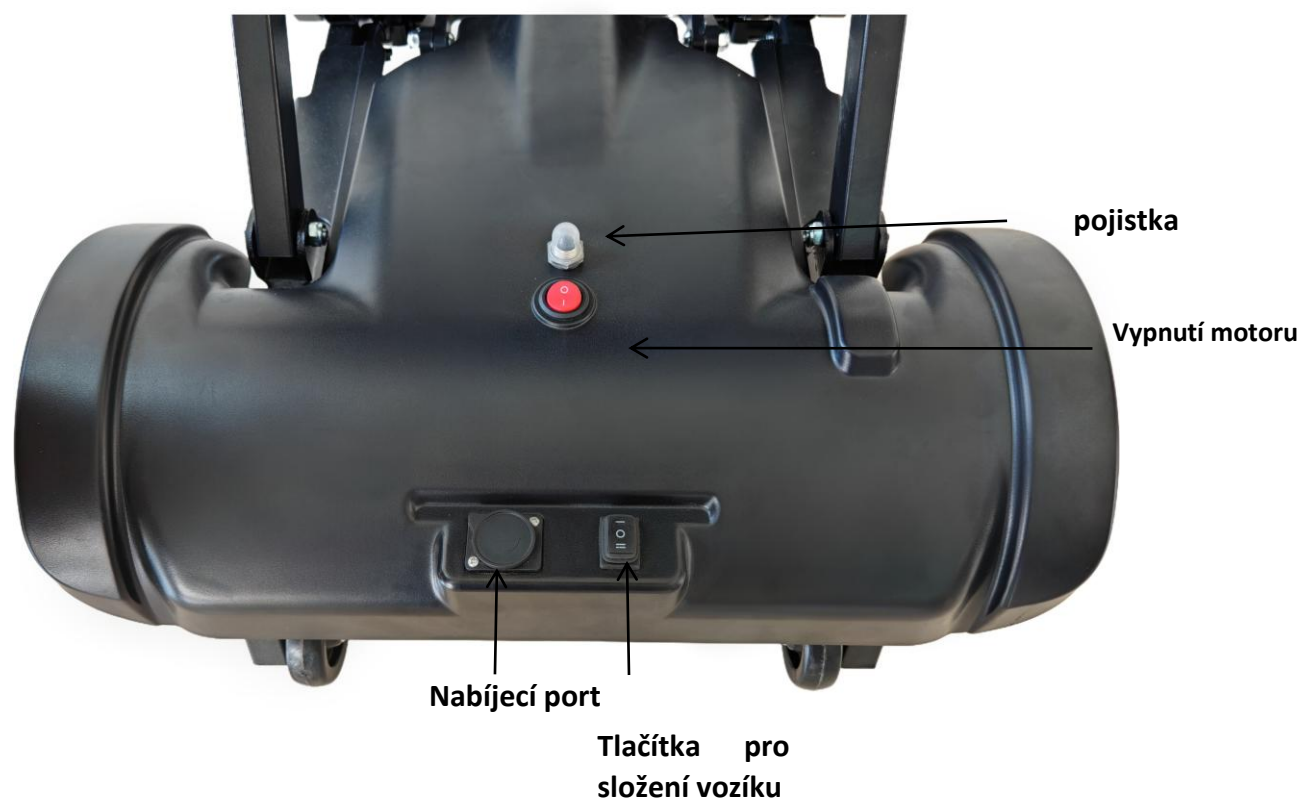

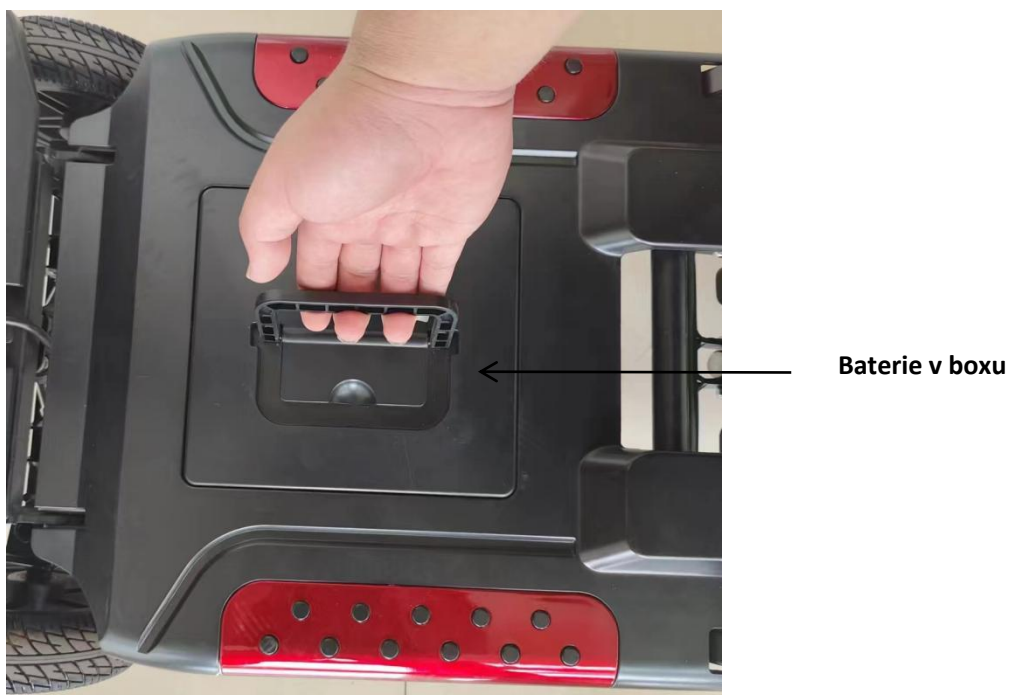

· **Upozornění: Spínací tlačítko pro brzdu**

Toto tlačítko slouží k zapojení a odpojení motoru

Na elektrickou polohu není možné skútr tlačit a jede pouze se zapnutým klíčkem a na polohu druhou, stroj nejede na elktřinu a lze jej pouze tlačit

(Upozornění : Tuto funkci lze aktivovat, pouze když je klíček vypnutý)

• **Nabíjecí port**

Nejprve prosím vypněte klíček a až poté je možno nabíjet.

Zasuňte zástrčku výstupního konce nabíječky do nabíjecí zásuvky elektrického vozíku nebo nabíjecí zásuvky na baterii a poté zasuňte do klasické domácí zásuvky. Kdy se nabíjí, kontrolka svítí červeně a červená kontrolka se změní na zelenou když je baterie nabitá. Používejte pouze nabíječku dodanou s vozíkem

• **Pojistka a ochrana proti přetížení**

Když je napájení zapnuto a na indikátoru napájení není žádná indikace, zkontrolujte, zda není pojistka vypnutá .

Zatížení je příliš těžké nebo stoupání je příliš strmé, ochrana proti přetížení na bateriovém boxu aktivuje vlastní ochranu a automaticky přeruší napájení, pokud se tak stane, tak stiskněte ochranu proti přetížení a napájení se obnoví.

• **Vyjímatelná přihrádka na baterie**

Zatáhněte za madlo a tahem svisle nahoru vyjmete baterii, poté jde baterie nabíjet samostatně

(2) Jak řídit skútr

1. pohodlně se usadte a otočte klíčkem pro aktivaci vašeho vozíku, poté naběhne display a uvidíte stav baterie

2. Držte rukojeť oběma rukama a pomalu posuňte páčku dopředu prsty pravé ruky, abyste posunuli skútr dopředu.

3. Nastavte ovladač rychlosti podle stavu vozovky, okolních podmínek a osobních preferencí, abyste mohli upravit rychlost jízdy.

4. Když chcete koloběžku zastavit, jednoduše uvolněte páčku pravou rukou a vraťte ji do středové polohy pro plynulé zastavení.

5. Při couvání věnujte pozornost okolním podmínkám, pomocí prstů levé ruky se pohybujte vpřed pomalu přepněte, při parkování páčku pusťte, skútr lze plynule zaparkovat.

III. Skládání a rozkládání

- Elektrický skládací spínač



Tlačítka pro složení vozíku

Skládací spínač ovládá skládání a rozkládání vozíku, při jeho používání nejprve vypněte klíček, položte vozík na rovnou plochu.

Stisknutím kolébky čísla „1“ se vozík složí, poté přepněte kolébku na symbol „0“.

Stisknutím kolébky na číslo „II“ se vozík rozloží, poté přepněte kolébku na symbol „0“.

Pokud ke složení koloběžky používáte dálkové ovládání, nejprve prosím vypněte klíček, položte vozík na rovnou plochu s přepínačem skládání v poloze „0“, dlouhým stisknutím tlačítka „A“ vozík rozložíte, dlouhým stisknutím tlačítka „B“ vozík složíte.

(Skládání): Uchopte přední **Rear lift handle** a zadní rukojeť současně, abyste je

IV. Nabíjení a údržba baterie

· Údržba baterie elektrického vozíku

Životnost baterie nesouvisí jen s kvalitou produktu od výrobce a konfigurací systému vozíku, ale hodně souvisí i s tím, jak ji spotřebitel používá a udržuje. Proto, zatímco požadujete od výrobce kvalitu, je také nesmírně důležité porozumět a osvojit si znalosti o údržbě baterie.

1 Vytvořte si návyk udržovat baterii plně nabitou. Ať už ujedete 5 km nebo 20 km každý den, měli byste baterii dobít, abyste ji udrželi v „plném stavu“ po dlouhou dobu.

2, Pravidelné hluboké vybití: Doporučuje se provádět hluboké vybití jednou za dva měsíce. Neskladujte baterii ve vybitém stavu, protože to může vážně ovlivnit její životnost. Čím déle bude v nečinnosti, tím větší poškození utrpí.

3, Vyvarujte se vybíjení vysokým proudem: Vysoký proud může poškodit baterii, takže přetížení se nedoporučuje. Teplota výrazně ovlivňuje kapacitu baterie, proto by se při nízké teplotě měla doba nabíjení patřičně prodloužit.

4, Údržba skútru a baterie: Ujistěte se, že ostatní části skútru jsou v dobrém stavu a udržujte povrch baterie čistý. Vyhněte se dlouhodobému vystavení slunečnímu záření, zejména při nabíjení. Nejlepší je skladovat skútr na chladném, větraném a suchém místě.

V . Údržba a péče

Abyste udrželi dobrý výkon vozíku, snížit výskyt poruch, zajistit bezpečnou a pohodlnou jízdu. Při každodenním používání věnujte pozornost následujícím bodům:

1, Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny, plně pochopte významy. Řídící jednotka vozíku je klíčovou součástí, Neotevírejte ji sami. Povrch jednotky by měl být vždy otřen suchým měkkým hadříkem, Je zakázáno používat jednotku v prostředí s nadměrnou teplotou, přetížením a nadměrnou vlhkostí.

2, Nepokoušejte se otevírat, opravovat nebo upravovat vnitřní strukturu motoru, mohlo by dojít k poškození motoru a ztrátě záruky. Je přísně zakázáno přetěžovat a zablokovat na dlouhou dobu a nečistoty na povrchu motoru by měly být často čištěny, zejména nečistoty na kabelu motoru. Je přísně zakázáno proniknout vodě. Překročení vodních kaluží hlubších než 5 cm může způsobit vniknutí vody do motoru, což může mít za následek trvalé poškození motoru.

3, Nepoužívejte benzín nebo jiné chemikálie k otírání krytu elektrického skútru nebo jiných částí. Použijte měkký hadřík, který byl navlhčený a vyždímaný. Kromě toho pravidelně kontrolujte a udržujte elektrický skútr.

Denně kontrolujte, zda je třeba baterii nabít, a před jízdou zkontrolujte brzdy, abyste se ujistili, že fungují správně. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací šrouby páky, a ujistěte se, že je páka v

neutrální poloze. Zabraňte namočení elektrického systému a používejte skútr až po vysušení. Pravidelně kontrolujte stav baterie a v případě potřeby vyčistěte její kontakty. Pokud se vozík delší dobu nepoužívá, nabijte ji přibližně jednou za měsíc. Pravidelně kontrolujte izolaci vodičů a ujistěte se, že všechny konektory mají dobrý kontakt. Zkontrolujte, zda se přední a zadní pneumatiky nekývají.

Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality, vezměte vozík ke svému prodejci na komplexní kontrolu profesionálním technikem.

VI. výkonový parametr

Celková velikost (D*Š*V)	Rozměr 97*50*96 cm	Baterie	24V 10AH (lithiová baterie)
GW/NW (kg)	27/24	výkon motoru	24V 180W
Rychlost postupu (km/h)	0-6	Rozměr pneumatiky (mm)	Φ175*50 (přední) Φ185*55 (zadní)
brzdná dráha (m)	<1 (Suchý chodník)	Nabíječka	DC24V2A
Nosnost (kg)	120	Maximální stoupání	12 °
Světla výška (mm)	75	způsob brzdění	elektromagnetická brzda

VII. běžné závady a způsoby odstraňování

Sériové číslo I	poruchový jev	příčina selhání	eliminační metody
1	Rukojeť akcelerace je vadná nebo je maximální rychlost nízká	① Napětí baterie je příliš nízké ② Rukojeť elektromagnetické brzdy není zavřená ③ Drát v rukojeti akcelerace spadne ④ Rukojeť akcelerace je zaseknutá nebo selhává	① Plně nabijte baterii ② Zavřete rukojeť elektromagnetické brzdy ③ Převažování ④ Vyčistěte nebo vyměňte rukojeť akcelerace
2	motor při zapnutém napájení nefunguje	① Napětí baterie je příliš nízké ② Rukojeť elektromagnetické brzdy není zavřená ③ Drát v rukojeti akcelerace spadne ④ Porucha motoru	① Plně nabijte baterii ② Zavřete rukojeť elektromagnetické brzdy ③ Převažování ④ Najděte profesionální nebo opravárenskou stanici k opravě

3	Nedostatečný nájezd na jedno nabití	① Nedostatečné nabíjení nebo porucha nabíječky ② Baterie stárne nebo je poškozená ③ mnoho do kopce, protivítr, časté brzdění, velké zatížení	① Dostatek elektřiny nebo vyměňte novou nabíječku ② Vyměňte baterii ③ Zkuste se vyhnout
4	Nabíječka nefunguje	① Zásuvka nabíječky je vypnutá nebo je zástrčka volně zapojena do zásuvky ② Pojištění nabíjecí zástrčky nabíječky nebo skútru je spálené ③ Kabely k řetězci baterie jsou odpojené ③ mnoho do kopce, protivítr, časté brzdění, velké zatížení	① Zajistěte zásuvky a konektory ② Vyměňte pojistku ③ Připojovací vodiče
5	Během jízdy je slyšet abnormální hluk	① Šrouby nebo matice jsou uvolněné ② opotřebení ložisek částí kola	① Utáhněte uvolněné šrouby nebo matice ② Vyměňte ložisko

6	Displej výkonu jednotky skútru	① Napětí baterie je příliš nízké ② Rukojeť elektromagnetické brzdy není zavřená ③ Drát v rukojeti akcelerace spadne	① Zajistěte zásuvky a konektory ② Vyměňte pojistku ③ Připojovací vodiče
7	Během jízdy je přerušeno napájení	① Ovladač má ochranné akce ② Tepelná ochrana schránky baterie chrání zařízení ③ Ochrana proti přehřátí motoru	① Vypněte klíč a znovu jej otevřete ② Resetujte tepelnou ochranu ③ Motor se před jízdou ochladí
8	Jiné závady	Další závady, které nejsou pokryty předchozími pokyny	Kontaktujte dodavatele nebo opravnu. Nerozebírejte sami

RACC@WAY®

e-motorcycles

For the most recent version of this user's manual and for all updated product information or for other languages version, please scan the QR code or contact with the local dealer.

Chcete-li získat nejnovější verzi této uživatelské příručky a všechny aktualizované informace o produktu nebo další jazykovou verzi, naskenujte prosím QR kód nebo se obraťte na místního prodejce.

Ak chcete získať najnovšiu verziu tejto používateľskej príručky a všetky aktualizované informácie o produkte alebo ďalšiu jazykovú verziu, naskenujte prosím QR kód alebo sa obráťte na miestneho predajcu.



Version: 2025/04-01

Technická podpora a servis (e-mail):

pavel.kozeluh@rulyt.cz
reklamace@rulyt.cz

Více informací na:

www.motoe.eu